

APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE ESTÉRIL CON ADHESIVO PARA I.V. (INTRAVENOSO)

FICHA TÉCNICA

Descripción

Especialmente diseñada para la fijación de zonas I.V. (intravenoso) fabricado con película de PU (poliuretano) permeable recubierta con adhesivo acrílico de grado médico y papel de liberación. Este apósito es estéril.

Características

- Estéril
- Película transparente
- I.V. (intravenoso)
- Apto uso médico
- Fabricada de poliuretano

Formatos

Medida	Código	Venta Min.	UxC	EAN 13
7cm x 9cm	ADCARIV709	50	2000	7804656457767

Vigencia y almacenamiento

- 3 años
- Mantener en lugar limpio y seco y donde las condiciones de temperatura no son extremas.

Certificaciones

- CE, FDA y Cumple ISO 13485:2016

Metodo de uso

- 1 Asegúrese de que el área de la herida esté limpia y seca.
- 2 Despegue el revestimiento del apósito para exponer la superficie adhesiva. No toque el lado adhesivo del apósito.
- 3 Coloque el apósito sobre la herida o el sitio ejerciendo una ligera presión. No estire el apósito mientras lo aplica.
- 4 Retire con cuidado el marco, alisando el vendaje mientras se retira.
- 5 Alise el apósito desde el centro hacia los bordes para ayudar a la adherencia.
- 6 Escriba la fecha y las iniciales del apósito en los espacios provistos.

**ADIOFFICE**

Avenida Marathon 3492, Macul | Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2477 2823
www.adioffice.cl

