

APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE ESTÉRIL CON MARCO DE APLICACIÓN

FICHA TÉCNICA

Descripción

Apósito con marco aislante, fabricado con película de PU (poliuretano) permeable recubierta con adhesivo acrílico de grado médico y papel de liberación. Este apósito tiene marco, es estéril y está diseñado para aplicarse sobre zonas I.V. (intravenosa).

Características

- ◆ Estéril
- ◆ Película transparente
- ◆ Marco de aplicación
- ◆ Apto uso médico
- ◆ Fabricada de poliuretano

Formatos

Medida	Código	Venta Min.	UxC	EAN 13
6cm x 7cm	ADCAR00607	100	4000	7804656457712
10cm x 12cm	ADCAR01012	50	1500	7804656457729

Vigencia y almacenamiento

- ◆ 3 años
- ◆ Mantener en lugar limpio y seco y donde las condiciones de temperatura no son extremas.

Certificaciones

- ◆ CE, FDA y Cumple ISO 13485:2016

Metodo de uso

- 1 Asegúrese de que el área de la herida esté limpia y seca.
- 2 Despegue el revestimiento del apósito para exponer la superficie adhesiva. No toque el lado adhesivo del apósito.
- 3 Coloque el apósito sobre la herida o el sitio ejerciendo una ligera presión. No estire el apósito mientras lo aplica.
- 4 Retire con cuidado el marco, alisando el vendaje mientras se retira.
- 5 Alise el apósito desde el centro hacia los bordes para ayudar a la adherencia.
- 6 Escriba la fecha y las iniciales del apósito en los espacios provistos.

**ADIOFFICE**

Avenida Marathon 3492, Macul | Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2477 2823
www.adioffice.cl

